



tláčítko pro zapnutí a vypnutí dávkovače se nachází na pravé straně

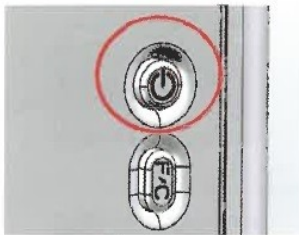


Varování

1. Nedotýkejte se dávkovače a především senzoru.
2. Po naplnění desinfekce do dávkovače se ujistěte, že je ve správné stabilní svislé poloze.

Automatický dávkovač desinfekce s měřením teploty

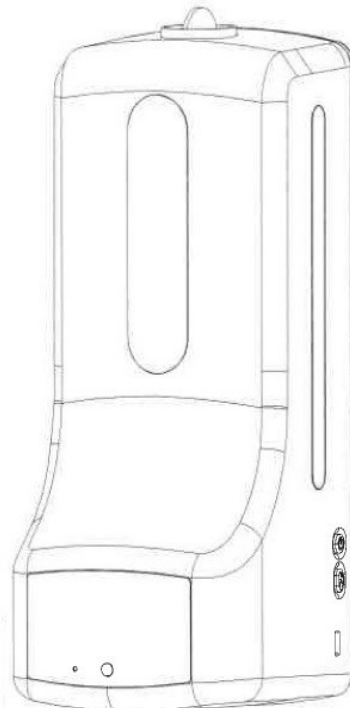

Popis

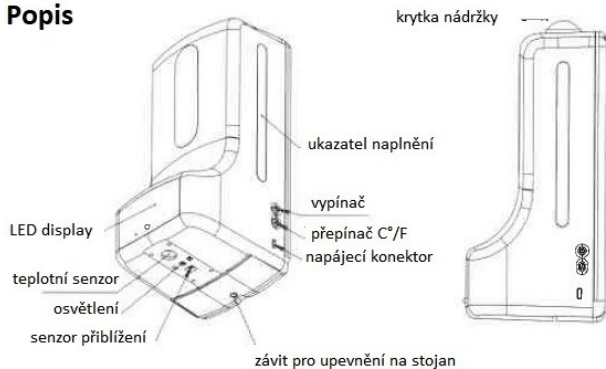

Specifikace

Technologie měření teploty	Infračervený senzor, bezkontaktní měření
Metoda měření	Snímač vzdálenosti
Měrná jednotka teploty	Volitelná °C/°F
Přesnost měření	±0.2 v rozsahu 34~45°C
Měřicí vzdálenost	5 ~ 10 cm
Displej	LED segmenty
Použitelná náplň	desinfekční gel
Napájení	USB-C - USB, 5VDC 1.5A zdroj, (není součástí dodávky)
Doba odezvy měření	0.5s
Pracovní režimy	Měření teploty a bezkontaktní dávkování desinfekce
Zásobník na desinfekci	ANO, max obsah 1000ml
Rozsah tělesné teploty	34--45°C
Provozní teplota	10--40°C
Alarmové funkce	Optický a zvukový alarm po dobu asi 10 sekund
Váha	702g
Rozměry	280x133x119mm
Obsah balení	teploměr, kabel USB-C, šrouby, uživatelská příručka

Funkce

pohotovostní stav je signalizován blikáním 3 bodů na displeji



při změření běžné teploty přístroj jednou pípe a rozsvítí se zelená LED



nápis "Lo" se zobrazí pokud je teplota nižší jak 34 stupňů



při změření **abnormální** teploty přístroj zapíše 10x a bliká červené LED (abnormální teplota je od 37,3)



nápis "Hi" se zobrazí pokud je teplota vyšší jak 45 stupňů



Postup

Tlačítkem pod vypínačem navolte jednotku měření C / F
V našich podmínkách volíme měření ve stupních Celsia tedy " C "



Vložte dlaň pod teploměr tak aby jste se ho nedotkli. Po změření a zobrazení teploty na displeji se ozve zvuková signalizace a proběhne aplikace gelu.



Instalace - umístění

přístroj můžeme připevnit na vhodný držák nebo stojan pomocí závitů ve spodní části, nebo ho přichytit pomocí přiložených hmoždinek a šroubů na stěnu

